



Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Provette per prove di coagulazione e PTT con Na Citrato

Provette di Polietilentereftalato (PET).

Resistenti alle sollecitazioni meccaniche, alla centrifugazione, alle rotture nelle normali condizioni d'uso e in caso di cadute accidentali.

Il Polietilentereftalato (PET) è un materiale trasparente che permette l'ispezione visiva del sangue e dei liquidi biologici prelevati.

Steril

Il sistema di chiusura è composto da un tappo in gomma butile perforabile e una ghiera di protezione/sicurezza di polietilene.

Etichetta in plastica

APPLICAZIONI: coagulazione

Confezione da 100 pezzi - Imballo 10 confezioni da 100 pezzi

Sono disponibili provette con tappo di colore diverso

Dati tecnici

Le provette sono fabbricate secondo le norme Europee ISO 6710 ed EN 14820 "Contenitori monouso per il prelievo di campioni di sangue venoso umano", nonché secondo le linee guida CLSI inerenti alla fabbricazione di provette con vuoto predeterminato e dei relativi dispositivi per il prelievo.

I processi di sterilizzazione sono convalidati in osservanza alle norme tecniche armonizzate relative ai Dispositivi Medici.

Le provette sono marchiate CE come da Direttiva 98/79/CE "dispositivi medico-diagnostici in vitro" IVD, ora emendata.

Per i dispositivi IVD sono disponibili le dichiarazioni di conformità CE.

Raccomandazioni d'uso

Indicazioni per miscelare: subito dopo il prelievo agitare 4-5 volte il campione per inversione lenta

Tempo minimo prima della centrifugazione: nessuno

Tempo massimo prima della centrifugazione: 2 - 4 h dopo il prelievo, a seconda del test da effettuare

Velocita di centrifugazione: 2000-2500 g per 15-20 minuti a 20-25 C. Utilizzare tempi e velocità di centrifugazione tali da garantire un plasma povero di piastrine

Conservazione del campione: il tempo e la temperatura di conservazione possono variare in funzione del test da effettuare

Codice	Descrizione	Diam. x altezza mm	Vuoto in ml	Colore tappo	Q.tà di Na Citrato in ml	Percentuale NA Citrato	Scadenza mesi P	ezzi per conf.
2914315	Provette con Na Citrato, mm 13x75GR ml 3,15 tappo azzurro trasparente	13x75 GR	3,15	AZZURRO TRASPARENTE	0,35	3,8	9	100
2914365	Provette con Na Citrato, mm 13x75GR ml 3,15 tappo azzurro trasparente	13x75 GR	3,15	AZZURRO TRASPARENTE	0,35	3,2	9	100

STERILE R