

55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

AGHI PER PRELIEVI MULTIPLI

montati su camicia con dispositivo di sicurezza




CODE codice	DESCRIPTION descrizione	COLOUR colore	SHELF-LIFE scadenza	PACKAGING confezion.
15520	Sterile needles with safety device 20G 1½" (Ø 0,9 x 38 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 20G 1½" (Ø 0,9 x 38 mm)</i>	Yellow Giallo	24 months mesi	25 / 200
15565	Sterile needles with safety device 20G 1" (Ø 0,9 x 25 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 20G 1" (Ø 0,9 x 25 mm)</i>	Yellow Giallo	24 months mesi	25 / 200
15521	Sterile needles with safety device 21G 1½" (Ø 0,8 x 38 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 21G 1½" (Ø 0,8 x 38 mm)</i>	Green Verde	24 months mesi	25 / 200
15566	Sterile needles with safety device 21G 1" (Ø 0,8 x 25 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 21G 1" (Ø 0,8 x 25 mm)</i>	Green Verde	24 months mesi	25 / 200
15522	Sterile needles with safety device 22G 1½" (Ø 0,7 x 38 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 22G 1½" (Ø 0,7 x 38 mm)</i>	Black Nero	24 months mesi	25 / 200
15567	Sterile needles with safety device 22G 1" (Ø 0,7 x 25 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 22G 1" (Ø 0,7 x 25 mm)</i>	Black Nero	24 months mesi	25 / 200




55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

ESA SAFETY HOLDER / ESA HOLDER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

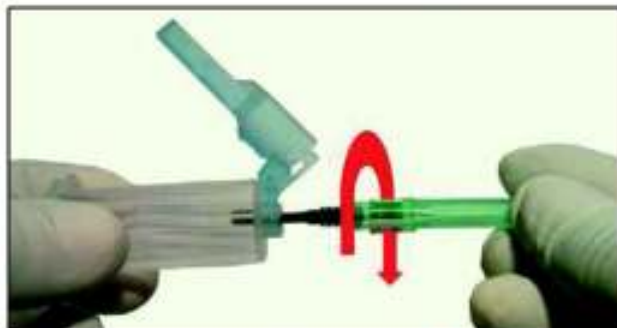


1. Screw the needle completely onto the holder.
1. Avvitare completamente l'ago all'holder.

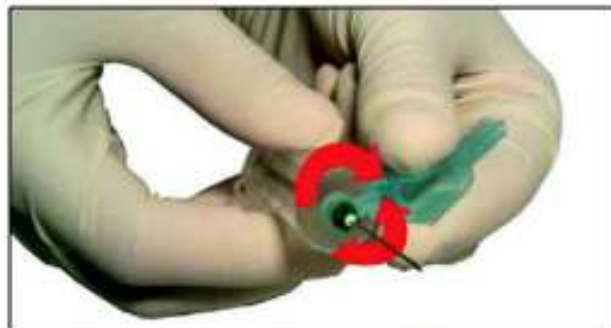

2. After removing the cap, to ease the blood collection, it's possible to rotate the safety device by taking it near the connection with the holder.
2. Dopo aver rimosso il cappuccio, per favorire l'operazione di prelievo, è possibile ruotare il dispositivo di sicurezza afferrandolo in prossimità del collegamento con l'holder.




3. Perform blood collection according to safety procedures.
3. Eseguire il prelievo di sangue attenendosi alle procedure di sicurezza.

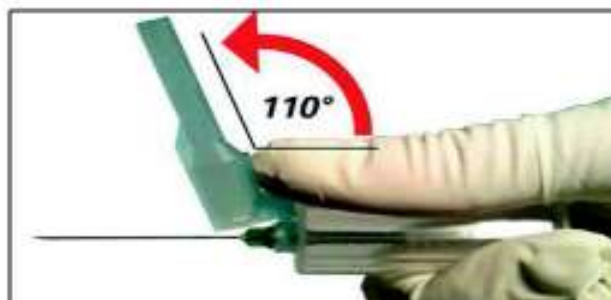

4. Immediately after the blood collection, use a finger to rotate the safety device to prepare it for closing stage.
4. Subito dopo il prelievo, con un dito, ruotare il dispositivo di sicurezza per predisporlo alla fase di chiusura.



5. Continue closing operation by pressing the safety device against a hard surface.
- 5.5. Proseguire l'operazione di chiusura premendo il dispositivo di sicurezza su una superficie rigida.

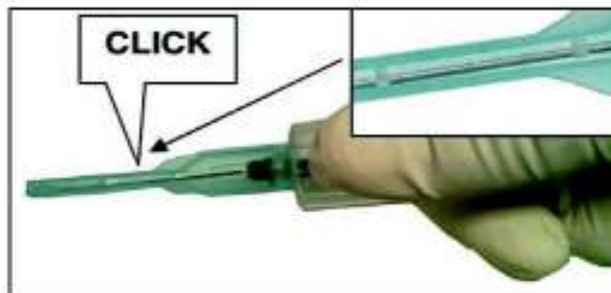

6. Closing operation ends after hearing a click and with the visual check of the locking of the needle.
6. L'operazione di chiusura si conclude dopo avere udito un click e con il controllo visivo del bloccaggio dell'ago.



7. Dispose the blood collection device into a sharps container to be incinerated. **DO NOT TRY TO REUSE OR TO TAMPER THE DEVICE AFTER USE**
7. Gettare il dispositivo di prelievo in un contenitore per oggetti taglienti da avviare a termodistruzione. **NON TENTARE DI RIUTILIZZARE O MANOMETTERE IL DISPOSITIVO DOPO L'USO**