

## Provette con gel e attivatore della coagulazione per siero

### per sierologia

Provette di Polietilentereftalato (PET).

Resistenti alle sollecitazioni meccaniche, alla centrifugazione, alle rotture nelle normali condizioni d'uso e in caso di cadute accidentali.

Il Polietilentereftalato (PET) è un materiale trasparente che permette l'ispezione visiva del sangue e dei liquidi biologici prelevati.



Sterili

Il sistema di chiusura è composto da un tappo in gomma butile perforabile e una ghiera di protezione/sicurezza di polietilene.

Etichetta di carta autoadesiva, per specifici usi medicali, formato 40x20 mm.

APPLICAZIONI: sierologia

Confezione da 100 pezzi - Imballo 6 confezioni da 100 pezzi

**Sono disponibili provette con tappo di colore diverso**

### Dati tecnici

Le provette sono fabbricate secondo le norme Europee ISO 6710 ed EN 14820 "Contenitori monouso per il prelievo di campioni di sangue venoso umano", nonché secondo le linee guida CLSI inerenti alla fabbricazione di provette con vuoto predeterminato e dei relativi dispositivi per il prelievo.

I processi di sterilizzazione sono convalidati in osservanza alle norme tecniche armonizzate relative ai Dispositivi Medici.

Le provette sono marchiate CE come da Direttiva 98/79/CE "dispositivi medico-diagnostici in vitro" IVD, ora emendata.

Per i dispositivi IVD sono disponibili le dichiarazioni di conformità CE.

Raccomandazioni d'uso

**Indicazioni per miscelare:** subito dopo il prelievo agitare 6-8 volte il campione per inversione lenta

**Tempo minimo prima della centrifugazione:** 30 minuti dopo il prelievo

**Tempo massimo prima della centrifugazione:** 2 h dopo il prelievo

**Velocità di centrifugazione:** 1600-2000 g per 10 minuti a 20 - 25 C

**Conservazione del campione:** dopo la centrifugazione vedi tabella sottostante

Temperature di conservazione	Fino a 24 C	a 2 - 4 C	< 20 C
Tempo massimo di conservazione	< 48 ore	7 giorni	> 7 giorni

Codice	Descrizione	Diam. x altezza mm	Vuoto in ml	Colore tappo	Shelf life mesi	Pezzi per conf.
2842711	Provette con gel sep.e att. coag. mm 13x75 ml 3,5	13x75	3,5	ROSSO	18	100

Codice	Descrizione	Diam. x altezza mm	Vuoto in ml	Colore tappo	Shelf life mesi	Pezzi per conf.
2843716	tappo rosso Provette con gel sep.e att. coag. mm 13x100 ml 5 tappo rosso	13x100	5	ROSSO	18	100
2843726	Provette con gel sep.e att. coag. mm 13x100 ml 5 tappo giallo	13x100	5	GIALLO	18	100
2844718	Provette con gel sep.e att. coag. mm 16x100 ml 8 tappo rosso	16x100	8	ROSSO	18	100