

## Camera contaglobuli NEUBAUER IMPROVED doppia senza pinze

### con reticolo a linee scure

Le camere contaglobuli si differenziano per le griglie di conteggio e per la profondità delle camere.

Linee perpendicolari, incise nella superficie della base della camera, formano una griglia che diventa visibile al microscopio.

Approvate per applicazioni (IVD) diagnostici in vitro, secondo la direttiva IVD 98/79 / CE, con marchio CE

**A richiesta sono disponibili camere contaglobuli con reticolo “Bright Lines” che facilitano la valutazione del campione grazie alle linee luminose che contrastano bene con lo sfondo scuro.**


La profondità della camera Neubauer improved è di 0,1 mm.

La griglia è composta da 3 x 3 grandi quadrati con area di 1 mm<sup>2</sup> ciascuno.

Il grande quadrato centrale è suddiviso in un gruppo di 5 x 5 quadrati aventi lato di 0,2 mm ciascuno.

Questi gruppi di quadrati sono ulteriormente suddivisi in 16 di un'area di 0,05 millimetri x 0,05 millimetri = 0,0025 mm<sup>2</sup> ciascuno.

Poiché la camera di conteggio è dotata di quadrati di diverse dimensioni può essere utilizzata per contare diversi tipi di cellule, ad esempio leucociti ed eritrociti.

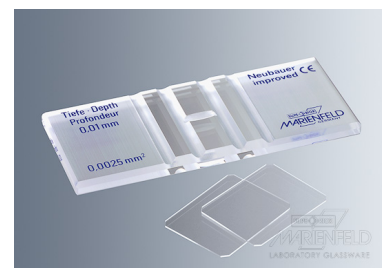

| Codice  | Descrizione                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1221020 | Camera contaglobuli NEUBAUER IMPROVED doppia senza pinze con reticolo a linee scure |