

Provette con gel separatore e K2 EDTA ml 5

Provette di Polietilentereftalato (PET).

Resistenti alle sollecitazioni meccaniche, alla centrifugazione, alle rotture nelle normali condizioni d'uso e in caso di cadute accidentali.

Il Polietilentereftalato (PET) è un materiale trasparente che permette l'ispezione visiva del sangue e dei liquidi biologici prelevati.

Sterili

Il sistema di chiusura è composto da un tappo in gomma butile perforabile e una ghiera di protezione/sicurezza di polietilene.

Etichetta di carta autoadesiva, per specifici usi medicali, formato 40x20 mm.

APPLICAZIONI: analisi su plasma EDTA per la diagnostica molecolare e per determinare la carica virale.

Confezione da 100 pezzi - Imballo 6 confezioni da 100 pezzi



Dati tecnici

Le provette sono fabbricate secondo le norme Europee ISO 6710 ed EN 14820 "Contenitori monouso per il prelievo di campioni di sangue venoso umano", nonché secondo le linee guida CLSI inerenti alla fabbricazione di provette con vuoto predeterminato e dei relativi dispositivi per il prelievo.

I processi di sterilizzazione sono convalidati in osservanza alle norme tecniche armonizzate relative ai Dispositivi Medici.

Le provette sono marchiate CE come da Direttiva 98/79/CE "dispositivi medico-diagnostici in vitro" IVD, ora emendata.

Per i dispositivi IVD sono disponibili le dichiarazioni di conformità CE.

Raccomandazioni d'uso

Indicazioni per miscelare: subito dopo il prelievo agitare 6-8 volte il campione per inversione lenta

Tempo minimo prima della centrifugazione: nessuno

Tempo massimo prima della centrifugazione: 2 h dopo il prelievo

Velocità di centrifugazione: 1300 g per 10 minuti a 20 - 25 C

Conservazione del campione: seguire le indicazioni in tabella per plasma separato dalla parte corpuscolata

Temperature di conservazione	Fino a 24 C	a 2 - 4 C	< -20 C
Tempo massimo di conservazione	< 8 ore	> 8 ore < 48 ore	> 48 ore

Codice	Descrizione	Diam. x altezza mm	Vuoto in ml	Colore tappo	Shelves life mesi	Pezzi per conf.
2843856	Provette con gel separatore e K2	13x100	5	bianco	18	100

Codice	Descrizione	Diam. x altezza mm	Vuoto in ml	Colore tappo	Shelves life mesi	Pezzi per conf.
	EDTA ml 5					