

## Tamponi in provetta con terreno di trasporto liquido AMIES - testa foam standard

### in provetta PP diam. 13x80 con tappo a vite

Dispositivi medici costituiti da un tampone (disponibile in diversi materiali e formati) e da una provetta contenente terreno di trasporto liquido.

Questi Dispositivi sono idonei per il prelievo ed il trasporto di batteri aerobi, anaerobi e batteri fastidiosi.

La vitalità dei microrganismi è garantita fino a 48 ore a temperatura ambiente o refrigerata. Questa particolare gamma di Dispositivi è basata su un terreno di trasporto liquido, pronto all'uso, adatto per colture batteriche, test rapidi e multipli, colorazioni di Gram, automazioni e test molecolari. Il design del kit è progettato per rendere questi tamponi facili da usare e affidabili.

Gli applicatori sono dotati di un break-point grazie al quale possono, in seguito al prelievo del campione biologico, essere inseriti nella provetta e catturati da un particolare tappo a vite a prova di perdita.

Sono prodotti in accordo con le GMP (Good Manufacturing Practice), hanno marchio CE, certificati come **Dispositivi Medici di classe IIa sterile**, non pirogeni, non citotossici e, su richiesta, certificati secondo lo standard CLSI M40-A2 (Quality Control of Microbiological Transport Systems, 2nd Edition).

I Dispositivi sono confezionati in blister singoli in peel-pack plastici che ne preservano la sterilità (SAL 10-6).

CND V901302

Tamponi con 1 mL di terreno trasporto **Amies** liquido, idonei per il prelievo ed il trasporto di batteri aerobi, anaerobi e batteri fastidiosi fino a 48 ore a temperatura ambiente o refrigerata (fino a 24 ore per *Neisseria gonorrhoeae*).

Possono essere utilizzati anche con micobatteri e funghi.

Le provette sono provviste di tappo a vite rosa e pre-etichettate per una corretta identificazione del campione.

Lunghezza asta mm 150.

### Materiali:

#### Tampone in speciale spugna poliuretana (foam), grado medicale:

consente una raccolta ottima del campione clinico e il successivo rilascio immediato nel terreno liquido.

Il puntale in schiuma morbida poliuretana è più confortevole per i pazienti e presenta vantaggi significativi sia per i metodi convenzionali che molecolari.



Asta in plastica con punto di rottura “break-point”.

Disponibile in due varianti:

**standard:** tamponi di dimensioni standard per prelievi boccali, nasali, faringei, vaginali, inguinali, rettali, fecali, cutanei e ferite;

**sottile:** tamponi di dimensioni mini per prelievi pediatrici, uretrali, urogenitali, oculari, nasali e nasofaringei.

#### **Tamponi con puntale in Poliestere:**

consente una adeguata raccolta del campione ed un successivo idoneo rilascio nel terreno liquido.

L’asta in plastica ha punto di rottura “break-point”.

Disponibile nella versione

**standard:** tamponi di dimensioni standard per prelievi boccali, nasali, faringei, vaginali, inguinali, rettali, fecali, cutanei e ferite.

Conf. 150 pz

Imballo 6x150 pz

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia di terreno</b>	<b>Tipo Asta</b>	<b>Materiale tampone</b>	<b>Pezzi per conf.</b>	<b>Imballo</b>
05326214	Tamponi in provetta con terreno di trasporto liquido AMIES - testa foam standard	AMIES	plastica	foam standard	150	6x150