

50 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

CONTENITORI MONOUSO PER LA RACCOLTA RIFIUTI ACUMINATI E TAGLIENTI

Contentori monouso a forma quadrata, resistenti alla perforazione, con coperchio a serraggio rotatorio, per lo smaltimento di rifiuti acuminati e taglienti.

Il coperchio è dotato di chiusura provvisoria e chiusura definitiva e possiede un'ampia apertura per lo smaltimento di oggetti voluminosi.

Tutti i contenitori sono provvisti di manici e supporti.

Autoclavabile a 134°C - 25 minuti

Capacità: 2 lt, 3 lt, 4 lt, 5 lt, 6 lt.

- Chiusura semplice e pratica, a scatto
- Facile manovrabilità per apertura provvisoria, con una sola mano
- Ampia apertura per lo smaltimento di rifiuti voluminosi
- Meccanismo di sgancio aghi da insulina
- Modelli 5lt H e 6lt H ideali per lo smaltimento di aghi particolarmente lunghi
- Indicazione del livello di riempimento massimo
- Disponibilità di supporti vari
- Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento



Materiale: polipropilene vergine. Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento.

Utilizzatori: tutti i servizi dove vengono utilizzati aghi, laboratori, servizio ospedaliero a domicilio, altri servizi sanitari.


Codice	Volume lt	Cap.utile lt	Cap. max kg	Dim.base cm	Altezza cm	Peso gr	Pezzi per confezione
05002202	2	1,9	1,19	10,4x10,4	19,7	205	60
05002203	3	2,5	1,50	11,9x11,9	21,8	240	60
05002204	4	3,4	2,25	12,8x12,8	28,2	350	40
05002205	5	4,0	2,60	16,7x16,7	20,0	350	30
05002206	6	5,2	3,40	11x11	48,3	490	30




FDA K071517



CONTENITORI per AGHI E TAGLIENTI in polipropilene autoclavabili

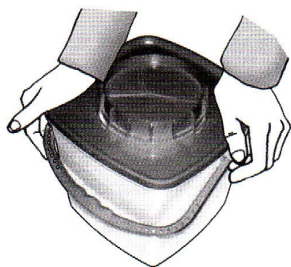

- Premere con forza sugli angoli opposti
- Press firmly on the opposite corners
- Appuyer fortement sur les coins du couvercle
- Auf die gegengesetzten Ecken fest drücken

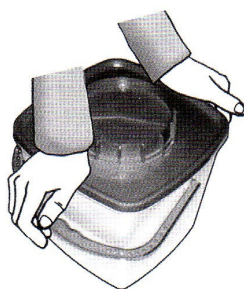


- Premere lungo il perimetro
- Press firmly on the opposite sides
- Appuyer fortement sur le bord du couvercle
- Dem Rand entlang drücken



1


- > Montaggio del coperchio
- > Lid assembling
- > Montage du couvercle
- > Deckelmontage

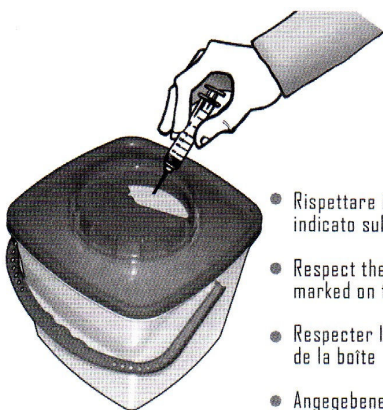

- Rispettare il livello di riempimento indicato sul contenitore
- Respect the maximum filling level marked on the container
- Respecter le niveau de remplissage de la boîte
- Angegebener Füllniveau beachten

2

- > Rimozione dell'ago
- > Needle removal
- > Evacuation du matériel
- > Nadelentsorgung

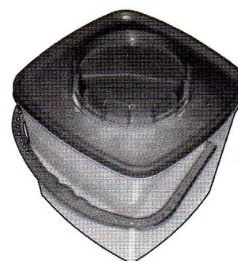

1 click

2 click

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ● Chiusura provvisoria | ● Chiusura definitiva |
| ● Temporary closure | ● Permanent closure |
| ● Fermeture provisoire | ● Fermeture définitive |
| ● Provisorischer Verschluss | ● Definitiver Verschluss |

3

- > Chiusura del coperchio
- > Lid closure
- > Fermeture du couvercle
- > Deckelverschluss

rischio biologico
biological hazard
risque biologique
biologischer Risiko



Conforme alla norma NF X 30 500 e all'allegato A, che fornisce una guida alla scelta e raccomandazioni relative all'utilizzo di questo tipo di contenitori. Rifiuti da smaltire in conformità con le leggi e regolamenti in vigore.
Comply to norm NF X 30 500, and attachment A, which provides a comprehensive guide to the choice and recommendations of use of this of containers. To be disposed according to current regulations.
Conforme à la NF X 30 500, et à son annexe A, donnant un guide de choix et de recommandations relatives à l'utilisation de ce type d'emballage. Déchets à éliminer conformément à la réglementation en vigueur.
Entsprechend der Norm NF X 30 500, und die Anlage A, welche Hinweis zum Gebrauch dieser Behälter gibt. Nadelentsorgung entsprechend laufendes Gesetz.