

CONTENITORI con preservante fissativo citologico per conservazione e trasporto di campioni di urina

Preservante fissativo citologico per la conservazione ed il trasporto di campioni di urina costituito da una scatola in cartoncino rigido contenente 3 contenitori in PP da 120 ml, ognuno preriempito con 40 ml di fissativo.

La scatola è regolarmente etichettata secondo quanto prevede la normativa vigente in materia di etichettatura di preparati pericolosi (Direttiva 2009/2/CE del 15.01.2009) e di IVD. (D.L.vo 08.09.2000, n. 332).

E' inoltre prevista un'area sui cui è inseribile il logo dell'Azienda committente, i dati identificativi del paziente ed eventuali indicazioni di utilizzo.

Contenitore in PP polipropilene, tappo in PE polietilene a perfetta tenuta.
Etichetta in polipropilene resistente ad acqua, alcool ed ai principali solventi.



Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido sino alla data di scadenza indicata purchè correttamente conservato.
Periodo di validità del prodotto: anni 3.

Marchio CE – IVD.
CND W01030705

Componenti preparato

Componente	% presente nel preparato
Etanolo 95%	50% v/v
Glicole etilenico	< 5% p/v
Tampone fosfato 0,01M	50% v/v

Caratteristiche preparato

I componenti costituenti il preparato e la loro concentrazione espongono sia l'utilizzatore professionale che il paziente ad un basso rischio di utilizzo. In particolare il fissativo è privo di componenti tossici per inalazione, contatto e ingestione (es. metanolo e formaldeide) e di agenti irritanti. Le misure precauzionali suggerite pongono il paziente in condizioni di utilizzare e trasportare il prodotto in sicurezza.+

Applicazione

Preservante fissativo citologico per la conservazione ed il trasporto di campioni di urina

Tecnica di fissazione

Aggiungere al preservante (40 ml) un uguale volume di campione di urina.

Per agevolare tale operazione sul lato destro dell'etichetta è presente una tacca di colore nero che indica il livello da raggiungere introducendo il campione di urina per ottenere un rapporto fissativo/campione pari a 1:1.

Il campione così allestito può essere conservato per 7-10 giorni senza modificazioni degenerative.

Avvertenze e precauzioni

Il preparato è classificato come infiammabile.

Leggere attentamente le informazioni riportate in etichetta.

Disponibile scheda sicurezza

Conservare il preparato a temperatura ambiente. Mantenere i contenitori ben chiusi.

Codice	Descrizione	Capacità nominale contenitore ml	Pezzi per conf.
05017213	CONTENITORE PP TAPPO A VITE ML 120 con FISSATIVO CITOL.ML40	120	3 contenitori da 120 ml ognuno con 40 ml di fissativo