

55 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

TESTSIMPLETS®

Vetrini precolorati

I vetrini TESTSIMPLETS sono vetrini pronti per l'uso precolorati con cristal violetto acetato e blu di metilene.

La quantità dei coloranti presenti sul vetrino ed il loro rapporto nello strato precolorato sono costanti e standardizzati per una colorazione affidabile.

Facile procedura di pulizia e di colorazione.

Possono essere utilizzati nel laboratorio o reparto ospedaliero e offrono una valida alternativa ai metodi classici, in particolar modo per gli esemplari singoli o piccole serie.

Marchio CE/IVD



Applicazioni

- valutazione di routine della conta ematica differenziale
 - Differenziazione della conta WBC normale e i suoi cambiamenti reattivi
 - Visualizzazione di tutte le forme di leucociti normali e piastrine
 - Rilevazione simultanea di reticolociti
- citologia cancro
- citologia urinaria
- citologia liquido cerebrospinale
- citologia nasale
- colorazione degli spermatozoi

Principio del test

- La parte colorata è composta da due coloranti **cristal violetto acetato e blu di metilene** in forma chimicamente pura.
- La quantità dei coloranti presenti sul vetrino ed il loro rapporto nello strato precolorato sono costanti e standardizzati per una colorazione affidabile
- Principio di reazione analogo a quello della colorazione pancromatica (panoptic stain).

Procedura

- sangue capillare: prendere una piccola goccia di sangue con il vetrino coprioggetto
- sangue venoso: applicare direttamente al vetrino coprioggetto
- posizionare il vetrino coprioggetto con la piccola goccia di sangue sull'area precolorata del vetrino portaoggetto
- pronto per la valutazione dopo solo 15 minuti (microscopio a 100x a immersione)

Codice	Descrizione	Pezzi per confezione
1221574	Testsimplets Vetrini portaoggetto precolorati (26 x 76 mm) – n. 50 Vetrini coprioggetto (24 x 36 mm) – n. 50	50 test