

LACCIO EMOSTATICO ROTONDO in SILICONE LATEX FREE

Dispositivo a marchio CE secondo Direttiva 93/42/CE all. 1 – Classe 1



Codice	4354335
Descrizione	laccio emostatico rotondo in silicone, senza orletti alle estremità
Codice secondo Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND)	V9003
Numero registrazione dispositivo presso Ministero della Salute Repertorio Dispositivi Medici	481476
Lunghezza	mm 350 ± 5%
Diametro esterno	mm 9 ± 5%
Peso specifico	1,20 gr/cm ³ ± 0,02%
Durezza:	Shore A 50 ± 5%
Imballo	Scatola da 100 pz
Materie prime	Silicone perossidico
Colore	Trasparente
Destinazione d'uso	Il laccio emostatico in silicone deve essere utilizzato unicamente allo scopo di facilitare il prelievo del sangue da esaminare e/o per iniezioni endovenose. Si deve tendere leggermente e, annodandolo, si arresta parzialmente la circolazione del sangue per poter evidenziare la vena allo scopo di introdurre l'ago; ad introduzione avvenuta, si provvede allo scioglimento del nodo.
Sanitizzazione	Lavaggio con acqua e sapone neutro, risciacquo con acqua corrente, asciugatura all'aria e conservazione a temperatura ambiente
Precauzioni	Evitare l'esposizione alla luce solare ed al calore, il contatto con liquidi lubrificanti e solventi di ogni genere e la conservazione del dispositivo sotto tensione e/o deformazione meccanica permanente.