

**SCHEDA PRODOTTO**  
**GUANTI IN LATTICE DOC ALOE POWDER FREE**  
**AD ALTA PROTEZIONE**  
**CE**

Guanto medicale monouso in puro lattice di gomma naturale non sterile, totalmente privo di talcatura. Superficie esterna microruvida, sensibilissimo e resistente. Indicato per pelli sensibili, il rivestimento interno con Aloe Vera mantiene le mani morbide ed idratate prevenendo secchezza, screpolature, pruriti e riducendo drasticamente le dermatiti. Forma anatomica con bordino antiarrotolamento. Colore verde.

**Destinazione d'uso:** Dispositivo Medico classe I, Dispositivo di Protezione individuale classe III (Tipo B) certificato dall'Ente Notificato CE0465. Adatto per uso ospedaliero ed ambulatoriale. Consigliato anche nei laboratori.

**Normative di riferimento:** Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici. Regolamento 425/2016 DPI. Direttiva 89/656/CEE. D.Lgs. n.81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro. Farmacopea Rep Italiana Ed. corrente, Farmacopea Europea Ed. corrente. EN 420, EN 455 I – II – III - IV, EN 374 – 1:2017, EN 374 – 2:2015, EN 374 – 4:2014, EN 374 – 5:2017, EN 16523 – 1:2015. ISO 2859. Il prodotto rispetta gli obblighi previsti dal Regolamento CE 1907/2006 REACH.

**Confezionamento:** Cartone da 1000 pezzi per misura, in 10 scatole/dispenser da 100 pezzi

COD. ARTICOLO	CND/EMDN	N. REPERTORIO	TAGLIA*	MISURA*
DOCVE ALOE PW 5	T010201	2248120/R	6	X-SMALL
DOCVE ALOE PW 6	T010201	2248120/R	7	SMALL
DOCVE ALOE PW 7	T010201	2248120/R	8	MEDIUM
DOCVE ALOE PW 8	T010201	2248120/R	9	LARGE

\*Rif. EN 420, EN 455-2

**Dimensioni e pesi:**

MISURA	LUNGHEZZA (mm)	LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm±0.03)			PESO STD (g)
			palmo	dita	polso	
X-SMALL	240±3	≤80	0.11	0.11	0.08	5.6±0.3
SMALL	240±3	80±10	0.11	0.11	0.08	6.0±0.3
MEDIUM	240±3	95±10	0.11	0.11	0.08	6.6±0.3
LARGE	240±3	110±10	0.11	0.11	0.08	7.4±0.3

Proprietà Fisiche	Prima invecchiamento	Dopo invecchiamento
Resistenza alla trazione (MPa)	≥ 18	≥ 14
% allungamento	≥ 650	≥ 500
Forza di rottura (N)	≥ 6	≥ 6

**Trattamento lubrificante:** mediante clorinatura, con rivestimento interno all'Aloe Vera. Quantità di polvere lubrificante residua (ASTM D6124) < 2.0 mg/guanto

**Vita utile del Prodotto:** 5 anni in accordo alla norma EN 455-4 invecchiamento in tempo reale.

**Proteina estraibile:** Proteina del lattice residua < 50 µg/g -secondo Standard ASTM D5712 (Metodo Lowry) EN455-3

Controllo Qualità (Ispection Level ISO 2859-1)	AQL
Assenza di fori	1.5
Difetti maggiori	2.5
Difetti minori	4.0
Dimensioni	4.0
Proprietà fisiche	4.0

**ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E MAGAZZINO**

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

**PRECAUZIONI E SICUREZZA:**

Attenzione: i guanti in lattice possono provocare in soggetti sensibili allergia da contatto.

Al fine di minimizzare i rischi applicare le seguenti procedure:

- verificare l'integrità del guanto subito dopo averlo indossato e prima di qualsiasi utilizzo
- non utilizzare i guanti con sostanze chimiche e prodotti non compatibili (consultare note informative disponibili dal produttore)
- cambiare spesso i guanti e lavare e asciugare bene le mani prima dell'uso
- sospendere immediatamente l'utilizzo in caso di reazione allergica e/o infiammazione
- lavare accuratamente le mani con sapone neutro e acqua tiepida
- consultare eventualmente il medico
- comunicare al fornitore eventuali effetti collaterali particolari

Attenzione: il prodotto è combustibile, ma non genera fiamma. La combustione può produrre fumi tossici: ossido di carbonio, acidi organici.

Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO<sub>2</sub>.

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Fare riferimento alle disposizioni nazionali, regionali e locali in vigore prima di procedere allo smaltimento.